

Cómo hacer la prueba de Fentalino

Guía de Polvos y Pildoras

Paso 1: Preparar la Muestra

Aplastar Tu Pildora

- Asegúrese de que su píldora o polvo esté triturado finamente hasta obtener una consistencia uniforme




Paso 2: Elija un método prueba

Prueba Todo

- Vierta en una taza
- Usa ½ taza o 100ml de agua por gramo de material
- Mezclar hasta que esté completamente disuelto

Opción 1 (Más Preciso)

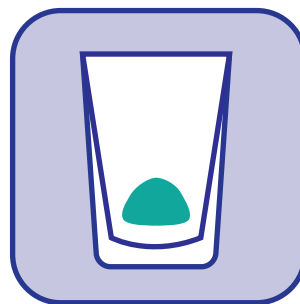

Residuo de Bolsa de Prueba

- Asegúrese de que el contenido dentro de la bolsa sea un polvo uniforme
- Volcar el contenido en otro contenedor
- Llena la bolsa vacía con agua y mézclala si es necesario


Opción 2



Probar Una Cucharada

- Pon una micro cucharada de sustancia en una taza pequeña
- Mezcle 1 tsp o 5ml de agua por cada cucharada de sustancia


Opción 3

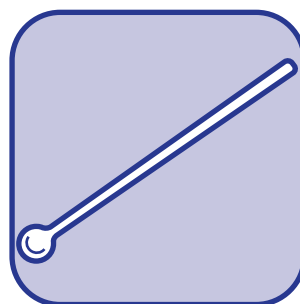

Paso 3: Pruebas

Usar La Tira Reactiva



- Coloque la tira reactiva con el lado ondulado hacia abajo en el agua durante 15s. Asegúrese de que el agua esté a la altura de la línea
- Retire la tira del agua y colóquelo sobre una superficie plana durante 1-2 minutos

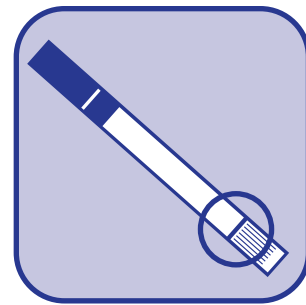

Paso 4: Resultados

Leer los Resultados

- Un **POSITIVO** en la prueba para fentanilo se indica por **UNA LÍNEA ROJA**
- Una prueba **NEGATIVO** para fentanilo se indica con **DOS LÍNEAS ROJAS**
- Recuerda, ninguna prueba es 100% precisa y una prueba negativa no significa necesariamente que estés a salvo

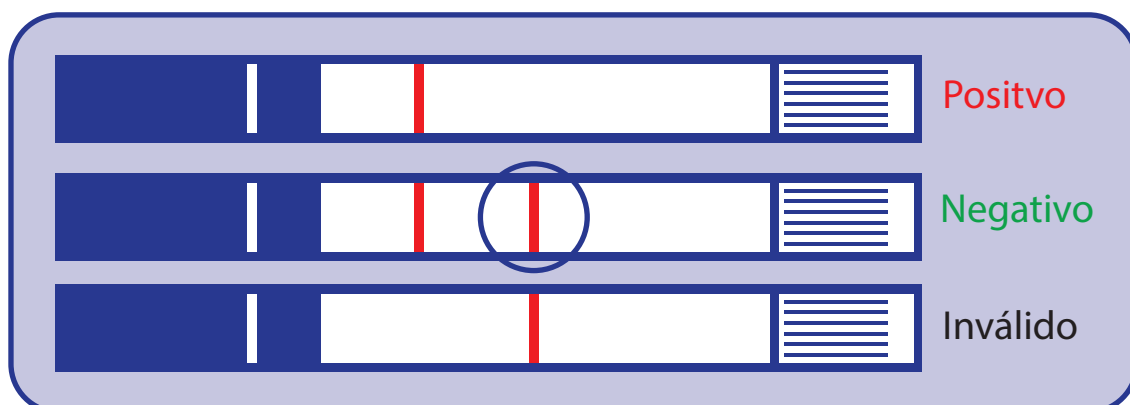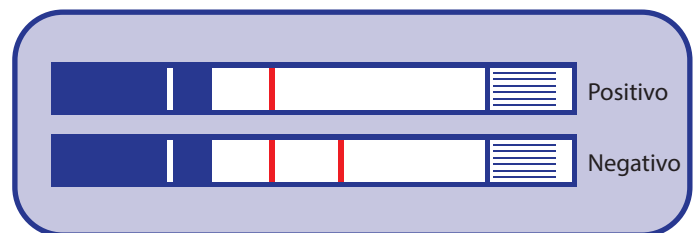

NOTA: Se debe considerar una prueba **NEGATIVA** aunque una segunda línea roja esté desvanecida o desmayada.

Si es posible, usa una prueba adicional para confirmar sus resultados

