

Cách Kiểm Tra Fentanyl

Hướng Dẫn về Bột & Viên Thuốc

Bước 1: Chuẩn Bị Mẫu

Nghiền viên thuốc của bạn

- Đảm bảo viên thuốc hoặc bột đã được nghiền mịn thành một kết cấu đồng đều




Bước 2: Chọn Phương Pháp Kiểm Tra

Kiểm Tra Mọi Thứ

- Đổ bột vào một cốc
- Sử dụng 1/2 cốc hoặc 100ml nước cho mỗi gram chất liệu
- Khuấy đều cho đến khi hoàn toàn tan

Lựa Chọn 1 (Chính Xác Nhất)

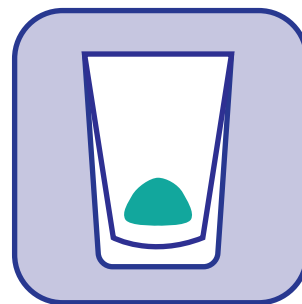

Kiểm tra Cặn Túi

- Đảm bảo nội dung bên trong túi là bột đồng đều
- Đổ nội dung vào một bộ chứa khác
- Làm đầy túi trống bằng nước và khuấy nếu cần


Lựa Chọn 2



Kiểm Tra Một Múc

- Đặt một mức nhỏ chất vào một cốc nhỏ
- Khuấy 1 muỗng canh hoặc 5ml nước cho mỗi mức chất.


Lựa Chọn 3

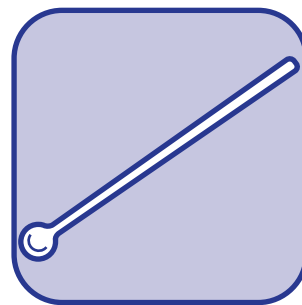

Bước 3: Kiểm tra

Sử dụng bộ que kiểm tra



- Đặt bộ que kiểm tra với mặt gợn sóng hướng xuống vào nước trong vòng 15 giây. Đảm bảo nước lên đến mức đường kẻ
- Lấy que ra khỏi nước và đặt nó lên một bề mặt phẳng trong vòng 1-2 phút

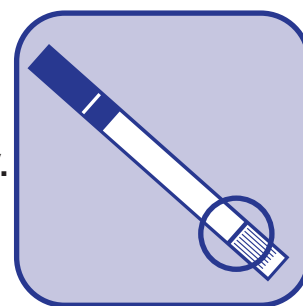

Bước 4: Kết Quả

Đọc Kết Quả

- Một kiểm tra **DƯƠNG** tính cho fentanyl được biểu thị bằng **MỘT DÒNG MÀU ĐỎ**
- Một kiểm tra **ÂM** tính cho fentanyl được biểu thị bằng **HAI DÒNG MÀU ĐỎ**
- Hãy nhớ, không có kiểm tra nào là 100% chính xác, và một kiểm tra **ÂM** tính không nhất thiết có nghĩa bạn an toàn.

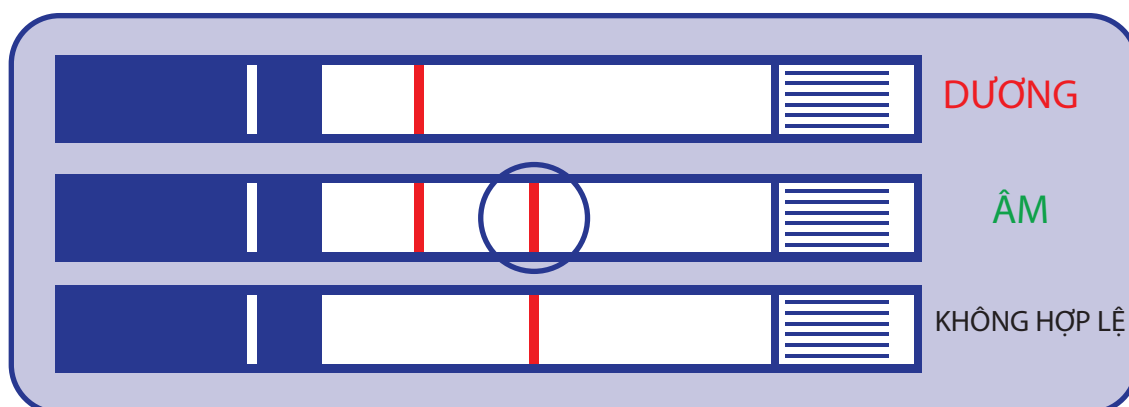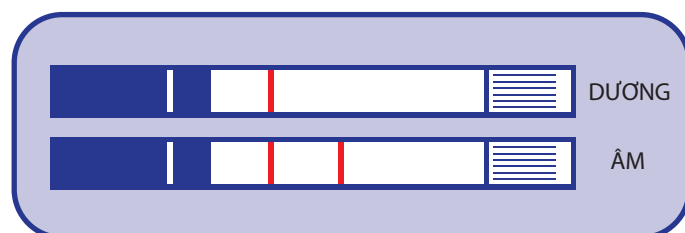

LƯU Ý: Nên xem xét đó là kết quả **ÂM** ngay cả khi dòng màu đỏ thứ hai bị mờ hoặc nhạt đi

Nếu có thể, hãy sử dụng một kiểm tra bổ sung để xác nhận kết quả của bạn.

